

1.4.2020

SleepAngel hygieniatyynyn käyttö- ja huolto-ohje



Käyttötarkoitus

Hygieniatyynyä käytetään normaalin tyynyn tapaan. Tyynyyn ei saa työntää neuloja tai käyttää muuta terävää esinettä, joka voi rikkoa pinnan.

Hygieniatyynyn päälle laitetaan kankainen tyynyliina. Huomioitava, että tuotteen kangas ei päästä läpi vettä tai ilmaa. Tukehtumisvaaran välttämiseksi varmista hoidettavan henkilön oikea asento.

Puhdistaminen

Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä jokaisen potilaan jälkeen. Tyynyä ei saa pestä pesukoneessa eikä dekossa. Puhdistuksen jälkeen anna tuotteen kuivua ennen kuin vaihdat tyynyliinan. PneumaPure™ filteri puhdistetaan samoja puhdistusohjeita noudattaen.

Normaaliin pyyhintään käytetään mietoa puhdistusainetta tai käyttövalmista yleispuhdistusliinaa. Jos käytät voimakasta pesuainetta, pyyhi tyyny sen jälkeen vedellä. Älä käytä hankaavia elementtejä, kuten pesuharjaa.

Desinfiointi laimennetulla hypokloriitilla, jossa on korkeintaan 1000 ppm aktiiviklooria, alkoholipohjaisella desinfektointiaineella, jossa on korkeintaan 72 % (w/w) alkoholia tai vastaavalla alkoholittomalla desinfektioaineella (esim. Oxivir Plus). Tämän jälkeen pyyhi uudelleen puhtaalla vedellä. Huomautus! Desinfektioaineiden käyttö voi tehdä väliaikaisia muutoksia kankaan pinnalle ja jättää pinnan herkemmäksi mekaaniselle vauriolle. Satunnaisesti voi käyttää 5000-10000 ppm aktiiviklooria.

Rikkoutuminen

Puhdistuksen yhteydessä tarkista, ettei tuotteessa ole rikkoumia, reikiä tai muita vaurioita. Tarkasta myös, ettei tyynyssä ole puhdistuksen jälkeen käyttöön vaikuttavia tahroja.

Rikkoutunut tuote palautetaan Sakupe Oy:lle takaisin muovisessa vaatepalautuspussissa likapyykin mukana. Rikkoutuneen tilalle tulee uusi automaattisesti.

Tuote on Sakupe Oy:n omistama vuokratuote. Tyynyssä on mikrosiru, jolla seurataan tyynyjen määrää asiakkaalla.

Lisätietoa

Lisätietoa tuotteen käytöstä ja huollosta voitte kysyä Sakupe Oy:n asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu@sakupe.fi / 017 178 030)

